

T-Swing mengsysteem

De T-Swing is een mengapparaat dat de afgenomen bloedbuizen volgens de voorgeschreven mengmethode met het juiste zwenkaantal mengt. Door het zwenken wordt het additief in de buis direct na de afname optimaal opgenomen in het bloed. Dit komt de functie van het additief ten goede en hiermee dus ook de resultaten van de analyse.


Standaardisatie van het mengproces

Door gebruik van de T-Swing wordt het mengproces bij de afname gestandaardiseerd. Het doel hiervan is het voorkomen van stolsels of nastollen en het verbeteren van de kwaliteit van het plasma of serum.

Hiervoor hoeft de buis enkel en alleen in de sleuf bovenin het apparaat gelegd te worden, waarna deze automatisch 8x gemengd zal worden volgens het zwenk-principe. Wanneer een buis maar 4x gemengd mag worden (citraat), kan de knop "4x" ingedrukt worden, alvorens de buis erin wordt gelegd. Deze buis zal dan 4x gemengd worden. Aan de aanvoerzijde kunnen een aantal buizen "in de wacht" liggen, aangezien het prikken sneller zal gaan dan het mengen, waardoor men altijd door kan werken.

Specificaties


- Voeding 220V of accuversie
- Altijd het juiste aantal keren zwenken
- Aanvoerbuffer voor 6 buizen
- Afvoerbuffer voor 6 buizen
- Geluidsarm
- Eenvoudige bediening
- CE-markering

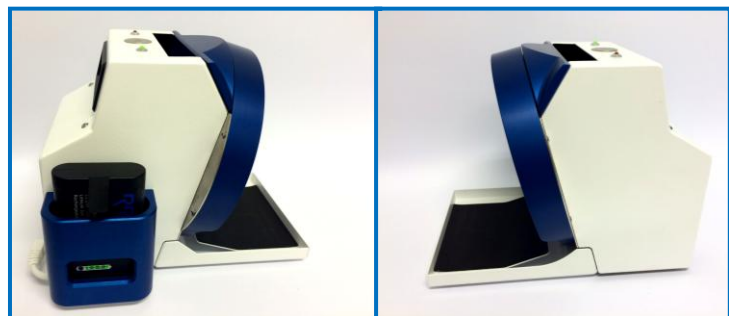

Optioneel

Indien mobiliteit gewenst is of wanneer er geen 220V beschikbaar is kan de T-Swing uitgevoerd worden met een accupack.

Capaciteit accu: 2-4 dagen mengen
Opladen accu: +/- 3 uur

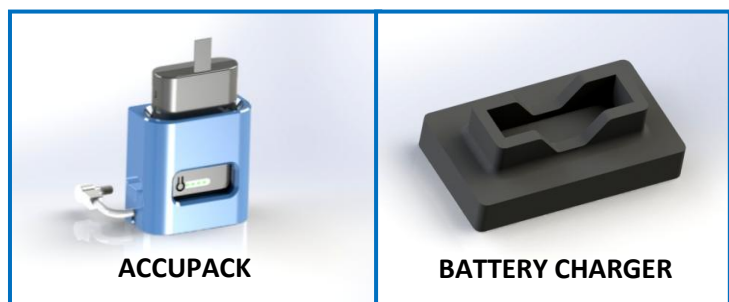

ACCUPACK

BATTERY CHARGER

Voor meer informatie:

info@gme.nl of +31 (0)53-4310573